

راهنمای استفاده از ویلچر سی پی

فلزی با پوشش نیکل یا پوشش رنگ کوره ای
وزن محصله فول با متعلقات و نگهدارنده ها : ۲۵ کیلو
وزن محصله فول بدون متعلقات و نگهدارنده ها : ۱۱ کیلو
وزن قابل تحمل : ۸۵ کیلو
ابعاد با کارتن : عرض ۵۰ سانت ارتفاع ۷۰ سانت طول ۸۹ سانت
ابعاد جمع شده بدنه ویلچر :
طول ۸۸ عرض ۵۰ ارتفاع با دسته خم شده ۵۲
نوع شاسی : مبله لوله ای تاشو برای تحمل وزن بالاتر
زیر دستی : متحرک حالت میز تحریر و قابل جدا شدن
زیر پای : متحرک برانکاردی و قابل جدا شدن
چرخ جلو و عقب : توپ
کفی : فوم سرد تزریقی با پارچه تنفسی ضد تعریق
پشتی : فوم سرد تزریقی با پارچه تنفسی ضد تعریق
عرض محصله فول در حالت باز : ۵۰
عرض محصله فول در حالت بسته : ۵۰ سانت
قطر چرخ عقب : ۳۰ سانت قطر چرخ جلو : ۱۸.۱۵ سانت
ارتفاع محصله فول در حالت باز : ۱۰۴ سانت
طول محصله فول در حالت برانکاردی : ۱۰۴ سانت
طول پشتی : ۳۹ سانت طول کفی : ۳۷ سانت
دارای پدها نگهدارنده سر ، گردن ، پهلو ، کنار ران ، بین پا
و پشت ساق پا دارای جک های پنوماتیک ضامن دار برای
استقرار در زاویه های دلخواه دارای جلیقه محافظ و کمربند
ایمنی قابلیت حالت برانکاردی شدن ویلچر

محتویات داخل کارتن بزرگ:

۱. کفی نشیمن و پشتی تنفسی
۲. اسکت فلزی
۳. یک کارتن کوچک حاوی اکسسوری های ویلچر



محتویات داخل کارتن کوچک:

۱. دو عدد بغل پهلویی با میله
۲. یک عدد پشتی سرتی با میله
۳. یک عدد بین پای با میله
۴. یک عدد جلیقه محافظ
۵. یک عدد کمربند ایمنی روی پا
۶. دو عدد میله با چرخ آنتی کستور



نحوه نصب و راه اندازی:

۱. پس از خارج کردن بدنه ویلچر از کارتن بزرگ دسته های پشتی تکیه گاه ویلچر را به صورت عمود قرار دهید.



۲. سپس پیچ و مهره سر جک پشتی که روی بدنه قرار دارد را باز کرده و جک را بین دو ورق قرار دهید و پیچ را دوباره ببندید.



۳. در مرحله بعد پشتی تکیه گاه که آرم شرکت دارد را برداشته و گیره نصب شده پشت تکیه گاه ویلچر را دقیق درون لوله بدنه فشار دهید و بعد ضامن قفل نصب شده را به پایین فشار دهید که دکمه قرمز رنگ قفل نیز برای راهسازی ضامن آن است.



۴. به همین ترتیب کفی نشیمن ویلچر که پارچه رنگی یو شکل را روی لوله های کفی فشار دهید.






Med Sky

mozhantebshop.ir
موزان طب نهایت توانبخشی



ISO 13485

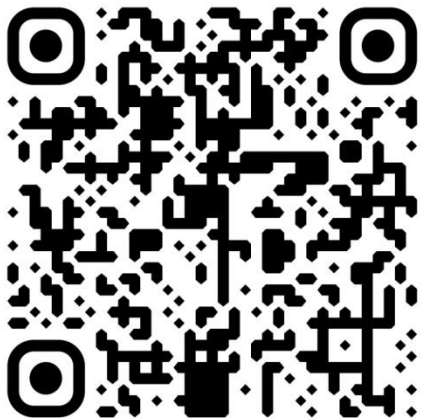

۹. روی گوشه های پشتی تکیه گاه و چپ و راست کفی نشیمنگاه تسمه هایی که قفل مادگی دارند دوخته شده که برای نصب جلیقه روی پشتی و کمر بند ایمنی روی کفی می باشد.



۱۰. برای تنظیم ارتفاع و جدا کردن زیردستی ها می توانید گل پیچ های مشکی رنگ را بچرخانید.




۱۱. در نهایت با فشردن ضامن مفصلی زیرپایی می توانید آن تنظیم کنید.



۶. در زیر کفی نشیمن قسمت جلو یک عدد پیچ قرار دارد آن را باز کرده و نگهدارنده بین پا را درون پروفیل قرار دهید و سپس پیچ را محکم کنید.



۷. برای نصب نگهدارنده پشت سر پیچ روی پشت ویلچر (وسط بالا) را باز کرده و بعد از تنظیم ارتفاع پشت سر با قد بیمار، پیچ را محکم کنید تا نگهدارنده پشت سر در جای خود ثابت شود.

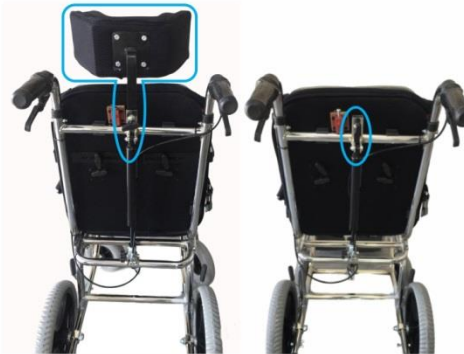

۸. جهت نصب چرخ های آنتی کستور در پشت ویلچر انتهای لوله های بدنه ویلچر دوعدد پیچ را باز کرده و لوله آنتی کستور را درون لوله شاسی بدنه قرار دهید و در جایی که سوراخ ها موازی هم قرار گرفت پیچ از سوراخ شاسی رد کرده و محکم کنید.



۵. برای نصب نگهدارنده ها پهلوی گل پیچ های مشکی رنگ پشت تکیه گاه ویلچر را باز کرده و نگهدارنده بغل پهلویی را از بین لوله و پشتی رد کنید. اندازه را نسبت به عرض بدن بیمار مشخص کرده و با محکم کردن پیچ ها نگهدارنده پهلوی ها را در جای خود ثابت کنید.



گل پیچ های مشکی رنگ

نگهدارنده های بغل پهلویی

