

کالسکه سی پی ۹۵۸

با دو لایه ضد تعریق

با سایز بندی متفاوت که لایه رویی مناسب برای سنین ۲ تا ۵ سال و لایه زیرین برای سنین ۵ تا ۹ سال با رشد طبیعی مناسب می‌باشد.

درضمن با رشد شخص سی پی می‌توانید جهت تغییر سایز ویلچر بدون پرداخت هزینه بیش از حد با شرکت موژان طب تماس گرفته و با هزینه جزئی سایز ویلچر را افزایش دهید.



محتویات داخل کارتن شامل:

1. اسکلت فلزی
2. کفی نشیمن و پشتی تنفسی
3. پشت سری
4. دو عدد چرخ آنتی کستور




نحوه نصب و راه‌اندازی:

1. پس از خارج کردن اسکلت ویلچر از جعبه دسته‌های ویلچر را به سمت بالا بکشید.



2. سپس پیچ سرچک را باز کرده و جک را در جای خود قرار دهید و پیچ را دوباره ببندید.

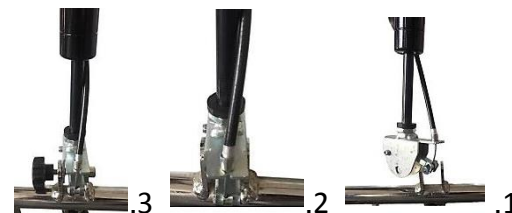

3. در مرحله بعد پشتی ویلچر را در جای خود قرارداده و با جا انداختن لوله در داخل لوله‌گیرهای پیچ شده به پشت کفی آن را در جای خود ثابت کنید.




4. برای نصب کفی کالسکه ابتدا پیچ فلکه‌ای تعبیه شده در زیر آن را باز کنید سپس با جا انداختن لوله در لوله‌گیر، کفی نشیمن را در جای مناسب خود قرار دهید. در آخر با سفت کردن پیچ از میان حفره مشخص شده در عکس، کفی نشیمن را در جای خود ثابت کنید.



5. برای نصب پشت سری ویلچر پیچ پشت ویلچر را باز کرده و بعد از تنظیم ارتفاع پشت سری با قد بیمار، پیچ را دوباره محکم کنید تا پشت سری در جای خود ثابت شود.



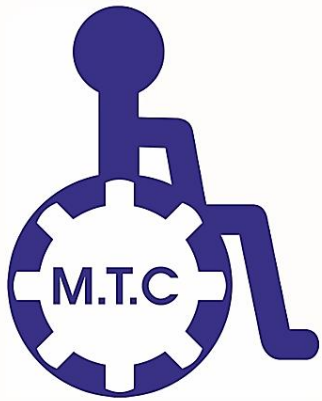

Med Sky

Mozhantebshop.ir

موژان طب نهایت توانبخشی

بارکد محصولات
مرتبط

بارکد سایت
جامع توانبخشی



محصولات مرتبط با کالسکه CP:



ویلچر مسافرتی کمجاسی پی




8. عملکرد جک‌های پنوماتیک کالسکه بدین صورت است که جک تعبیه شده بر روی پشتی کالسکه، زاویه‌ی پشتی را تغییر داده تا جایی که به حالت برانکارد دربیاید و جک نصب شده در زیر کفی، زاویه‌ی کفی کالسکه را به صورت الکلنگی تغییر میدهد.



9. پد پارچه‌ای کفی و پشتی از دو قسمت داخلی و زیرین تشکیل شده است که در زمانی که کاربر در سنین نوزادی قرار دارد، پد داخلی کاملا بدن فرد را ساپورت میکند و زمانی که کاربر رشد کرده و به سنین کودکی میرسد با جدا کردن کمربندها و برداشتن لایه داخلی، فضای بیشتر و راحت‌تری برای فرد تامین می‌شود پس نیازی به تعوض کالسکه نیست.



6. برای نصب چرخ‌های آنتی کستور، پیچ لوله‌های عقبی ویلچر را باز کرده و لوله آنتی کستور را داخل لوله عقبی قرار دهید. در جایی که سوراخ‌ها موازی هم قرار گرفت، دوبار پیچ را ببندید.

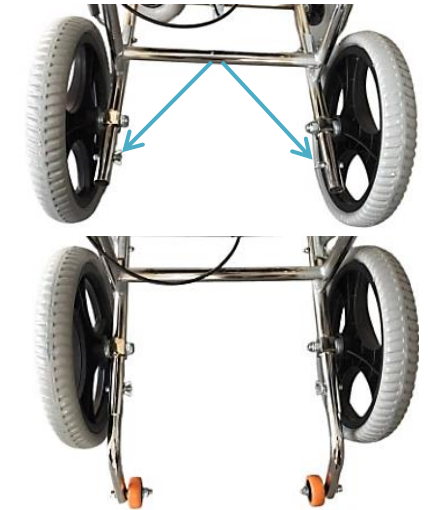

7. با فشردن ضامن زیرپایی می‌توانید زاویه آن را تنظیم کنید.

