

راهنمای نصب مکمل یا ارتفاع دهنده توالت فرنگی MT-111

ارتفاع توالت فرنگی های سرامیکی برای افرادی که دچار ضعف عضلانی یا مشکل حرکتی هستند و به راحتی نمی توانند بشینند و بلند شوند یا افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند مناسب نمی باشد. باید در نظر داشته باشید که این افراد تا مدتی دچار محدودیت حرکتی هستند. می توان بدون تغییرات در سرویس بهداشتی و بنایی و صرف زمان زیاد از ابزار کمکی به نام مکمل توالت فرنگی یا ارتفاع دهنده توالت فرنگی بهره گرفت. در اینصورت نیازی نیست در زمان نشستن زانو فرد بیش از حد معمول خم شود و نیز در زمان برخاستن فرد انرژی کمتری استفاده می کند و هنگام نشستن و برخاستن تعادل خود را از دست نمی دهد. با استفاده از تجهیزات توانبخشی فرد اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند و برای استفاده از توالت فرنگی به کمک دیگران احتیاجی ندارد. در حال حاضر که استفاده از توالت فرنگی بسیار رایج شده است به خصوص برای افراد سالمند و کم توان استفاده از ارتفاع دهنده توالت فرنگی بسیار مفید و کمک کننده می باشد که راحت تر بتوانند کارهای شخصی خودشان را انجام دهند و تولیدات تجهیزات توانبخشی مؤثران طب در راستای توانبخشی بیشتر صورت می گیرد.

محتویات داخل جعبه مکمل:

مکمل توالت فرنگی دربدار

دو عدد پیچ پلاستیکی + دو عدد پایه L شکل برای ثابت کردن مکمل



۱. ابتدا پیچ ها را مطابق شکل زیر داخل پایه ها قرار دهید. (شیار پایین گل پیچ باید درون شیار پایه قرار بگیرد)



۲. سپس پایه متصل به پیچ را در شیار دوطرف زیر مکمل فشار دهید.

۳. در نهایت درب و حلقه توالت فرنگی را برداشته و مکمل روی لبه سرامیکی توالت فرنگی قرار می دهید و پیچ های طرفین را سفت می کنید. برای استحکام و چسبندگی بیشتر توصیه می شود از چسب سیلیکون یا چسب آکواریوم استفاده کنید بدین صورت که روی لبه سرامیکی توالت فرنگی بصورت پمادی چسب میزنید و مکمل روی چسب قرار می دهید و بعد از ۶ ساعت چسب خشک شده و مکمل قابل استفاده می باشد.



بار کسب
سایت جامع
تجهیزات توانبخشی



مؤثران طب نهایت توانبخشی

بار کسب
محصولات مرتبط
با مکمل توالت فرنگی

